


Экспресс-определение группы крови по системе ABO/Rh ручным методом за 30 секунд с помощью планшета ABD PAD®



Планшеты ABD PAD® позволяют определить группу крови и резус по системе ABO/Rh, определив присутствие антигенов А, В и D на мембране эритроцитов в крови человека в три стадии за 30 секунд:

1. Активация:
(с помощью буферного раствора):

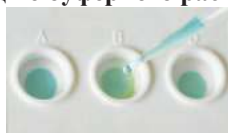

2. Раскапывание пробы:



3. Проявление:



Основные преимущества использования в работе планшетов ABD PAD®:

- Время получения результата не более 30 секунд;
- Предварительно нанесенные в лунках планшетов реагенты;
- Возможность хранения результатов;
- Использование при температуре до 40°C и влажности до 90%;
- Хранение при температуре до 25°C.

Производитель: Компания **DIAGAST S.a.s.**, входящая в состав Французской Национальной Службы Крови.

Принцип предварительного нанесения реагентов: инновационная технология **M-TRAP®**, основанная на эффекте иммобилизации антител путем образования ковалентных связей с пористой мембраной.

Область применения: предварительный скрининг доноров, полевые и выездные условия, прикроватное тестирование.

Комплект поставки для проведения 200 тестов:

Наименование	Кат №	Упаковка	Рег. удостоверение
Планшет ABD PAD ®	40102	10 x 20 тестов	N P3H 2020/9714 от 06.03.20
Буферный раствор PAD	40100	2 x (5 x 50 мл)	N P3H 2020/9521 от 16.01.20

Расчетная стоимость теста на одного человека: 96 рублей.

Официальный дистрибьютор продукции Diagast S.a.s. в Российской Федерации:



ЗАО «НПО АСТА»
107014, г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, а/я 453
Тел.: (495) 781-04-08, e-mail: pharm@asta.ru, www.asta.ru